





KINESIOLOGIE-TAPES KINESIOLOGY TAPE BANDES DE KINÉSIOLOGIE

SK

KINEZIOLÓGICKÉ PÁSKY

Návod na použitie

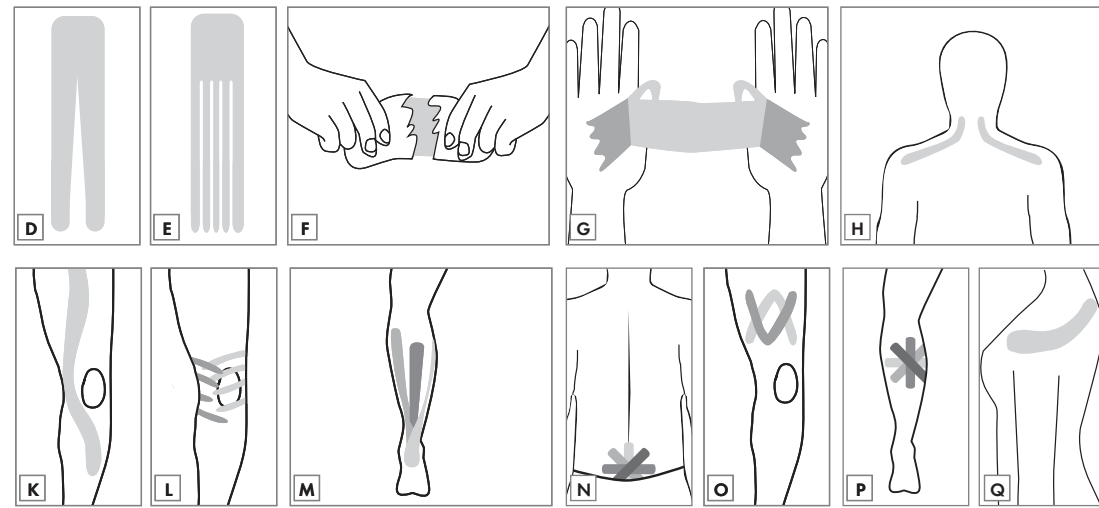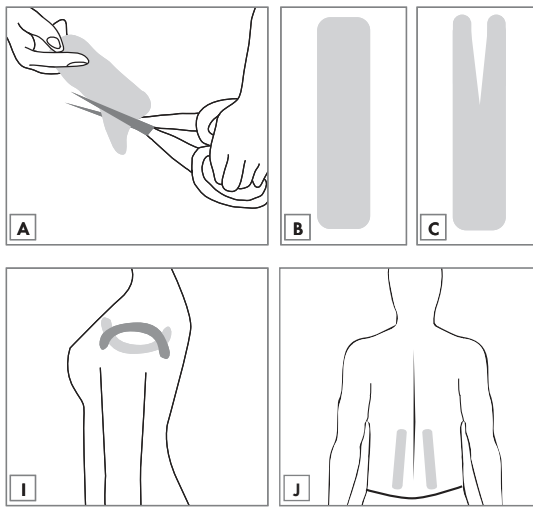


HORIZONTE TEXTIL GMBH

Obenhauptstr. 5 (Haus 2), D-22335 Hamburg
DEUTSCHLAND
info@horizonte.de, phone: +49 (0)40 82 22 44-80
Horizonte Nr: 219-HK1-01
LOT 02020330530 2023-11
REF 330530 Rev. 2020/24



2020

Dátum vydania (návod na použitie) : 2020

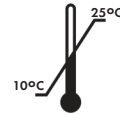

SK

Pomocou tohto kódu QR získate prístup na stránku
www.lidl-service.com a otvorte návod na použitie s číslom článku
(IAN) 330530.

IAN 330530_2004



IAN 330530_2004

SK

Srdečne blahozeláme ku kúpe vášho nového produktu. Rozhodli ste sa tým pre veľmi kvalitný výrobok. Súčasťou tohto produktu je aj návod na použitie. Obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnosť a použitie. Pred použitím produktu sa oboznámte so všetkými pokynmi na použitie a bezpečnostnými pokynmi. Produkt používajte len v bezchybnom stave, ako je písomne odporúčané a na dané oblasti použitia. Počas trvania používania si uchovajte obal produktu vrátane tejto prílohy a pri odovzdaní produktu ďalším osobám im ju odovzdajte spolu s produktom.

Zdravotníckou pomôckou

Iba na používanie v domácnosti.

Obsah balenia

- 1 x modrá kineziologická páska (500 x 5 cm)
- 1 x čierna kineziologická páska (500 x 5 cm)
- 1 x ružová kineziologická páska (500 x 5 cm)
- 1 x zelená kineziologická páska (500 x 5 cm)
- 1 x návod na používanie

Použitie v súlade s určením

Tento produkt je určený na umiestnenie na pokožku. Keď sa elastická páska lepí napnutá na pokožku, neprenáša na pokožku iba svoju napínaciu silu, ale ju aj posilňuje, a to tak, že vytvorí dodatočnú textilnú vrstvu.

Elastická páska môže pri správnom používaní prispieť k stabilizácii kĺbov, ako aj uvoľneniu a zmierneniu bolesti svalov.

Napínacia sila stimuluje pokožku a jej lymfatické cievy, čo pôsobí podporné na odtok vody z tkanív, a tým aj na redukciu opuchov.

Elastickú pásku môžete použiť pri:

- problémoch so vzpriamených držaním tela (problémy so stabilitou)
- nestabilite kĺbov
- napnutých svaloch
- bolestiach kĺbov
- pravidelnej bolesti

Obmedzenia pri používaní

⚠ V nasledujúcich prípadoch pásku nepoužívajte vôbec alebo iba po konzultácii s lekárom:

- otvorené rany
- ochorenia kože
- trombózy
- liečba inými metódami (napr. fango, masáže, stimulačný elektrický prúd)
- alergie na materiál produktu, lepidlo alebo nosič
- chronické obťažave v oblasti používania

Bezpečnostné upozornenia

- ⚠ Produkt by mal lepíť v prípade akútnych poranení alebo komplexných chorôb lekár alebo fyzioterapeut.
- ⚠ Produkt uschovajte mimo dosahu detí.
- ⚠ Tehotné ženy by sa mali pred nalepením produktu poradiť s lekárom.
- ⚠ Produkt nelepte s príliš vysokým pnutím. Nemalo by sa vyskytovať príliš silné stiahnutie.

- ⚠ Produkt ponechajte na pokožke maximálne sedem dní.
- ⚠ Ošetrovanú časť tela nesmiete produktom obvinúť kompletne!
- ⚠ Nepoužívajte pri ochoreniach a podráždení pokožky ako napr. neurodermatitída.
- ⚠ Nadmerná citlivosť alebo alergické reakcie sa prejavujú ako začervenanie v spojení so svrbením a/alebo opuchom olepennej pokožky. V takom prípade produkt okamžite odstráňte.
- ⚠ Začervenanie alebo svrbenie a/alebo opuch môžu vzniknúť aj po stiahnutí pásky z dôvodu stimulovania prietoku v pokožke a je normálne, ak zmizne v priebehu niekoľkých minút.
- ⚠ Ak sa pri nosení vyskytnú problémy, produkt okamžite odlepte a miesto očistite studenou vodou. Problémy by sa mali zmierniť, prípadne stratíť v rámci niekoľkých minút po odstránení pásky. Ak by problémy pretrvávali alebo sa zhoršili, navštívte lekára.

Používanie

Praktické ukážky rôznych aplikácií nájdete v produktovom videu na www.lidl-service.com.

Pre správne umiestnenie produktu odporúčame prizvať druhú osobu.

Upozornenie: Konce produktu (kotvy) sa lepia bez pnutia.

Príprava

Dôležité! Priamo pred nalepením pásky nepoužívajte krém a podobne.

1. Predmetné miesto si v prípade silného ochlpenia ohoľte.
2. Miesto na tele očistíte prostriedkom, ktorý rozpustí masť (napr. mydlo alebo dezinfekčný prostriedok na pokožku). Pokožka musí byť čistá, odmastená a suchá.

Odrezanie pásky/tvary kineziologických pásov

Odmerajte dĺžku požadovaného tvaru pásky pre dané miesto na tele a potrebnú dĺžku odstrihnite.

Po odstrihnutí požadovaného tvaru pásky zaoblite všetky rohy nožnicami (obr. A).

Nastrihať je možné nasledujúce tvary pásky:

- tvar I (obr. B)
- tvar Y (obr. C)
 1. Produkt zložte pozdĺž, aby ste vytvorili stredovú líniu.
 2. Nastrihnite tretinu dĺžky produktu na stredovej línii.
- Nohavice (obr. D)
 1. Produkt zložte pozdĺž, aby ste vytvorili stredovú líniu.
 2. Nastrihnite dve tretiny dĺžky produktu na stredovej línii.
- Úzke pásy (mihalnica) (obr. E)
 1. Produkt otočte tak, aby ste videli predznačené línie papiera.
 2. Nastrihnite dve tretiny dĺžky produktu na predznačených pozdĺžnych líniiach.

Odlepenie papiera

Produkt sa nachádza na papieri, ktorý musíte odlepiť.

Dôležité! Nedotýkajte sa lepiacej plochy produktu, pretože v opačnom prípade stratí lepiacu schopnosť.

1. Odstrihnutý produkt zoberte do ruky.
2. Potiahnite za obidva konce, kým sa papier neroztrhne (obr. F).
3. Odlepte papier, začnite na odtrhutej strane (obr. G). Papier je možné ľahko odlepiť iba miernym otočením pásky.

Šija

Upozornenie: Tu by vám mala pri lepení pomôcť druhá osoba.

Môže pôsobiť podperne pri napnutí v oblasti šije.

1. Určite si potrebnú dĺžku na základe svalov šije.
2. Pripravte si produkt v tvare I.
3. Hlavu predkloňte, aby vzniklo napätie v svaloch šije.
4. Nalepte produkt s miernym pnutím na telo. Konce by ste mali nalepiť bez pnutia (obr. H).

Plecia

Upozornenie: Tu by vám mala pri lepení pomôcť druhá osoba.

Môže slúžiť na zvýšenie pocitu stability a pohyblivosti v ramennom kĺbe.

1. Určite si potrebnú dĺžku na základe svalov ramena.
2. Pripravte si dva produkty v tvare I.
3. Nalepte prvý produkt s miernym pnutím zhora na ramená.
4. Nalepte druhý produkt s vyšším pnutím zbok na ramená (obr. I).

Chrbát

Upozornenie: Tu by vám mala pri lepení pomôcť druhá osoba.

Môže sa nalepiť vo vzpriamenej polohe a pomôcť pri nesprávnom držaní tela. Môže sa nalepiť v polohe s predklonom, čo prispeje k uvoľneniu spodných svalov chrbta.

1. Pripravte si dva dlhé produkty v tvare I.
2. Produkt nalepte bez pnutia vľavo a vpravo pozdĺž chrbtice na chrbát (obr. J).

Stehno

Môže pomôcť pri napnutí, kŕčoch, natrhnutí a ruptúre svalov.

Môže sa použiť aj pri určitých problémoch s kolienami, pretože je možné posilniť vnímanie kolena správnym nalepením.

1. Určite si potrebnú dĺžku na základe svalov stehna.
2. Pripravte si produkt v tvare I.
3. Obviňte nohu, na ktorú chcete pásku použiť.
4. Produkt nalepte pozdĺž svalov stehna na stehno (obr. K).

Koleno

Môže pomôcť pri opuchoch v mäkkom tkanive.

1. Pripravte si dva produkty v tvare mihalnice podľa veľkosti vášho kolena.
2. Posadte sa a koleno pohodlne obviňte.
3. Koniec prvého produktu nalepte (bez pásov) do predkolena.
4. Každý jednotlivý pásik nalepte plošne cez koleno.
5. Koniec druhého produktu nalepte (bez pásov) na vonkajšiu stranu kolena.
6. Jednotlivé pásiky nalepte plošne cez pásiky prvého produktu (obr. L).

Achilles-in / vädli

Upozornenie: Tu by vám mala pri lepení pomôcť druhá osoba.

Môže pomôcť pri zápaloch, ako aj v oblasti Achillovej šľachy a pri prechode na lýtkový sval.

1. Určite si potrebnú dĺžku na základe Achillovej šľachy a svalov lýtka.
2. Pripravte si produkt v tvare nohavice a I.
3. Zoberte produkt v tvare I a nadvihnite päťu.
4. Nalepte koniec produktu a päťu sa postavte na podlahu.
5. Stiahnite papier a produkt nalepte na achillovu päťu/lýtko.
6. Zdvihnite päťu a produkt v tvare nohavice nalepte jedným koncom na prvý produkt.
7. Stiahnite papier a „nohavice“ produktu zalepte vľavo a vpravo okolo lýtka (obr. M).

Špecifický prípad: Pravidelné bolesti (dysmenorea)

Upozornenie: Tu by vám mala pri lepení pomôcť druhá osoba.

1. Nájdite na chrbte bod nad prvým krížovým stavcom (S1) Nachádza sa v predĺžení chrbtice.
2. Pripravte si štyri dlhé produkty v tvare I.
3. Nalepte štyri produkty s veľkým pnutím do kríža cez tento bod. Dávajú pozor na to, aby ste konce produktu nalepili bez pnutia (obr. N).

Špecifický prípad: Ruptúra svalov stehna

1. Pripravte si dva krátke produkty v tvare I.
2. Produkt nalepte cez seba na bolestivé miesto (obr. P).

Špecifický prípad: Ruptúra svalov lýtka

1. A négy rövid terméket I-alakban készítse elő.
2. Ragassza egymás fölé a termékeket az izomhúzódás fölött (P. ábra).

Špecifický prípad: Supraspinálny syndróm

Môže sa používať pri poraneniach/zápaloch supraspinálneho svaly a jeho šľachy

1. Určite si potrebnú dĺžku na základe svalov ramena. Odmerajte tri veľké časti od zadnej časti produktu (cca 15 cm).
2. Pripravte si produkt v tvare I.
3. Otočte obvinutú pažu na bok, na ktorom sa má tejpovať rameno, za chrbát.
4. Produkt nalepte s miernym pnutím na rameno, pozdĺž okraja lopatky (obr. Q).

Odstránenie produktu

Produkt plošne stiahnite pozdĺž kože, nevytvárajte uhol. Eventuálne odstráňte zvyšky lepidla pomocou dezinfekčného prostriedku alebo vazelíny.

Upozornenie: Čím dlhšie necháte produkt na pokožke, tým ľahšie je možné ho odstrániť. Odstraňovanie produktu môže byť nepríjemné z dôvodu ochlpenia. Preto odporúčame lepené miesto najprv ohoľiť. Nalepte priamo po holení.

Čistenie a starostlivosť

- Nastrihaný produkt sa používa iba jedenkrát.
- Mokrý produkt osušte (napr. z plávania, sprchy alebo kúpeľa). Pozor: Produkt nedrhňte do sucha, pretože sa odlepi z pokožky.

Skladovanie

- Skladujte na chladnom a suchom mieste a chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Skladujte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Pokyny k likvidácii

Produkt zlikvidujte ekologicky prostredníctvom akreditovaného strediska alebo vo vašom stredisku na zber komunálneho odpadu. Pritom dodržiavajte platné predpisy.

Servis v Nemecku

Tel.: +49 (0)40 82 22 44-80

E-Mail: info@horizonte.de



Dodržiňte návod na použitie



Pozor: Vždy sa riadte uvedenými varovaniami.



Nepoužívajte opakovane



Uskladnite v suchu



Chráňte pred slnečným žiarením



Objednávacie číslo (číslo článku)



Označenie šarže



Použitelný do



Dátum výroby (rok): 2020



Výrobca



Označenie CE



Obmedzenie teploty

(odporúčaná pracovná teplota pri používaní)

1 | 3

DE AT CH

KINESIOLOGIE-TAPES

GB IE

KINESIOLOGY TAPE

FR BE

BANDES DE KINÉSIOLOGIE

2 | 3

NL BE

KINESIOLOGIE-TAPES

PL

TAŚMY KINEZJOLOGICZNE

CZ

KINEZILOGICKÉ PÁSKY

Supplement to the instructions for use / Ergänzungsblatt zur Gebrauchsanweisung / Supplément à la mode d'emploi / Supplemento alle istruzioni per l'uso / Aanvulling op de gebruiksaanwijzing / Lisäys käyttöohjeisiin / Tillägg till bruksanvisningen / Uzupelnienie instrukcja użytkowania / Papildymas naudojimo instrukcija / Lietošanas instrukcijas papildinājums / A használati utasítás kiegészítése / Dopolnilo navodil za uporabo / Doplňte návod k použití / Doplňte návod na použitie / Suplemento a las instrucciones de uso / Suplemento às instruções de utilização / Suppler til brugsanvisningen / Supliment la instrucțiunile de utilizare / Дополнение към инструкциите за употреба
Συμπλήρωμα στις οδηγίες χρήσης



Complies with Directive 93/42/EEC / Konform mit der Richtlinie 93/42/EWG / En conformité avec la directive 93/42/CEE / Conforme alla direttiva 93/42/CEE / Conform richtlijn 93/42/EWG / Tuote vastaa 93/42/ETY-direktiiviä / Överensstämmer med direktiv 93/42/EWG / Atitinka direktyvą 93/42/EEB / Atbilst Direktīvai 93/42/EEK / A 93/42/EGK jelű irányelv előírásaival összhangban készült / V skladu z direktivo 93/42/EGS / Vyhovuje směrnicí 93/42/EWG / Vyhovuje smernicu 93/42/EHS / Conforme con la Directiva 93/42/CEE / Em conformidade com a Directiva 93/42/CEE / Konform iht. retninglinie 93/42/EØF / Conform cu directiva 93/42/CEE / Отговаря на директива 93/42/ЕИО / Πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ

IAN 330530_2004

Horizonte Nr: 219-HKI-01

LOT 02020330530